

Ausstieg eines Passagiers / Ausladen eines Rollstuhls

1. Klappen Sie die Auffahrrampe aus, bis sie auf dem Boden aufliegt.
2. Lösen Sie die Gurtrollen der Retraktoren.
3. Lösen Sie die Retraktoren von den Fittings.
4. Lösen Sie die Retraktoren vom Rollstuhl.
5. Schalten Sie den Motor eines Elektrorollstuhls ein.
6. Lösen Sie die Feststellbremsen des Rollstuhls.

⚠️ Warnung! Der Rollstuhl kann unkontrolliert zurückrollen. Der Passagier im Rollstuhl kann verletzt werden. Stellen Sie sich hinter den Rollstuhl, um ihn gegen Zurückrollen zu sichern. Betätigen Sie erst dann den Kippschalter, sodass die Kontrollleuchte im Kippschalter aufleuchtet.

7. Betätigen Sie den Kippschalter, sodass die Kontrollleuchte im Kippschalter aufleuchtet.
8. Begleiten Sie den Rollstuhl von der Auffahrrampe.
9. Lösen Sie die Elektrogurte vom Rollstuhl.
10. Klappen Sie die Auffahrrampe mit eingeschobener Rampenverlängerung hoch, bis sie hörbar einrastet.

Nutzung des Fahrzeugs ohne Passagier

Nach dem Ausstieg eines Passagiers / dem Ausladen eines Rollstuhls:

1. Klappen Sie die Auffahrrampe hoch, bis sie in der senkrechten Position hörbar einrastet.
2. Bei EasyFlex Rampe: Ziehen Sie den Bedienehebel nach oben.



3. Klappen Sie die Auffahrrampe vollständig nach innen, bis ihre Anschläge auf dem Fahrzeugboden seitlich der Bodenwanne aufliegen.

⚠️ Achtung! Die Auffahrrampe darf mit maximal 350 kg belastet werden. Die vollständig eingeklappte Auffahrrampe darf mit maximal 100 kg belastet werden.

Diese Kurzbedienungsanleitung ersetzt keinesfalls die reguläre Bedienungsanleitung! Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes sorgfältig die Bedienungsanleitung durch!

Technische Änderungen vorbehalten.



AMF-Brunns GmbH & Co. KG
Hauptstraße | 26689 Apen | Germany
Telefon +49 (0) 4489 / 72 72 22
Telefax +49 (0) 4489 / 62 45
service.hubmatik@amf-bruns.de
www.amf-bruns.de

AMF-BRUNS HECKAUSSCHNITT

Volkswagen Caddy 5



KURZ-BEDIENUNGS-ANLEITUNG
vor Gebrauch sorgfältig lesen, griffbereit im Fahrzeug mitführen!



www.amf-bruns.de

Ausklappen der Auffahrrampe


1. Bei EasyFlex Rampe: Klappen Sie, falls erforderlich, die eingeklappte Auffahrrampe nach oben in die senkrechte Position, bis sie hörbar einrastet.



2. Halten Sie die Rampe fest.
3. Drücken Sie den Bedienhebel herunter.



4. Bei Fahrzeugen mit Rampenverlängerung: Klappen Sie die Rampe etwas aus und ziehen Sie die Rampenverlängerung vollständig heraus.
5. Klappen Sie die Auffahrrampe vollständig aus.

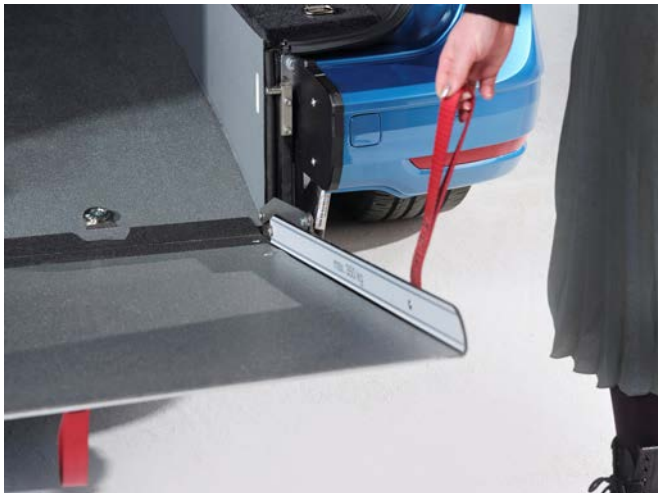


⚠️ Vorsicht! Halten Sie die Auffahrrampe fest, bis sie vollständig am Boden aufliegt. Lassen Sie die Auffahrrampe langsam ausklappen.

Bei einem Fahrzeug mit kurzem Radstand:

1. Klappen Sie, falls erforderlich, die Rücksitze hoch.
2. Klappen Sie die Sitzabstützungen herunter, sodass sie ebenerdig versenkt sind.
3. Sichern Sie die hochgeklappten Sitze mit den originalen Stützen.

Aufnehmen eines Passagiers / eines Rollstuhls

1. Begleiten Sie den Rollstuhl vor die Auffahrrampe.
2. Betätigen Sie den Kippschalter, sodass die Kontrollleuchte im Kippschalter aufleuchtet.

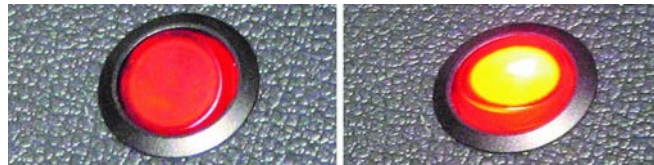

3. Ziehen Sie die Elektrogurte bis zum Rollstuhl heraus.
4. Befestigen Sie die Elektrogurte am Rollstuhl.



5. Betätigen Sie den Kippschalter, sodass die Kontrollleuchte im Kippschalter erlischt.

⚠️ Warnung! Der Rollstuhl kann unkontrolliert zurückrollen, wenn die Kontrollleuchte im Kippschalter leuchtet. Der Passagier im Rollstuhl kann verletzt werden. Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte im Kippschalter nicht leuchtet. Schieben oder fahren Sie erst dann den Rollstuhl die Auffahrrampe hinauf.

⚠️ Achtung! Beim Einfahren den Rollstuhl 1 bis 2 Mal stufenweise zurückziehen, damit das Gurtband stramm aufrollt und Gurtlose vermieden wird!

6. Schieben oder fahren Sie den Rollstuhl in das Fahrzeug.
7. Schalten Sie den Motor eines Elektrorollstuhls aus.

Sicherung des Passagiers und des Rollstuhls im Fahrzeug

1. Hängen Sie die Retraktoren in die Fittinge ein.



2. Schließen Sie die Retraktoren am Rollstuhl an.
3. Spannen Sie die Retraktoren durch Anziehen der Gurtrollen.



4. Ziehen Sie die Feststellbremsen des Rollstuhls fest.
5. Sichern Sie den Passagier im Rollstuhl mit den vorhandenen Personenrückhaltesystemen.
6. Heben Sie die Auffahrrampe an.
7. Schieben Sie die Rampenverlängerung vollständig ein.
8. Klappen Sie die Auffahrrampe hoch, bis sie hörbar einrastet.